

Crioterapia Portátil **DermaFreeze**[®]

DermaFreeze[®] é um produto que incorpora as qualidades terapêuticas do resfriamento controlado e de aplicação segura e eficaz. É portátil, pode ser facilmente deslocado, e de boa relação custo-benefício.

DermaFreeze[®] oferece um protocolo rápido e simples. O seu custo operacional é totalmente compatível com outras técnicas crioterapêuticas.

Indicações

Na terapêutica de lesões benignas de pele como:

- ♦ melanose solar
- ♦ verrugas
- ♦ queratoses
- ♦ nevus epiteliais
- ♦ leucodermia gutata e outras

Protocolo de Uso

Seleciona-se o cone limitativo adequado ao diâmetro da lesão. Os jatos do criogênio devem ser curtos e dirigidos para a parede interna e inferior do cone.

Após o borbulhamento haverá formação de *frost* de gelo e que promoverá o efeito terapêutico desejado.

É importante que sejam lidas as instruções de uso do produto antes da sua aplicação.

O produto deve ser armazenado em local com temperatura ambiente, à sombra.

Não volátil. Validade de três anos.

Conheça também:

- ♦ Lupas Magnalente
- ♦ Dermatoscopia Digital



DermaFreeze[®] usa como propelente gás fluoretado, atóxico, inodoro, não inflamável e não poluente. Possui as características recomendadas pela Agência EPA - Environmental Protection Agency.

Acondicionamento

O kit inclui:

- ♦ tubo do criogênio com 250 g / 350 ml.
- ♦ tubo extensor.
- ♦ cones de \varnothing 3, 4, 5, 7, 9 e 12 mm, reutilizáveis.
- ♦ instruções de uso.

Crioterapia Portátil *DermaFreeze*[®]

Resultados de uso do *DermaFreeze*[®]

Melanose (foto aumentada)



14 dias depois



Verruga Plantar



60 dias depois (02 sessões)



Verruga comum



45 dias depois



Criopeeling



21 dias depois

